

Soluscope™ PAA



Désinfectant pour le retraitement automatisé des endoscopes

Désinfectant pour endoscopes flexibles. A utiliser exclusivement dans les laveurs-désinfecteurs Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 et Soluscope Serie XS

- Désinfectant à base d'acide peracétique
- Activité antimicrobienne à large spectre
- Conforme à la norme EN ISO 15883-4
- Compatible avec une large gamme d'endoscopes flexibles
- Bouchon avec système de verrouillage et canule intégrée au bidon



Soluscope™ PAA

Désinfectant pour endoscopes flexibles. A utiliser exclusivement dans les laveurs-désinfecteurs Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 et Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 4 PA



Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 5

Composition du produit

- 5% (w/w) Acide peracétique
- Agents stabilisants

Caractéristiques du produit

- Durée de conservation : 24 mois non ouvert
- Aspect : clair et incolore
- Odeur : caractéristique
- pH du produit pur : 1 - 4.2*
- Poids spécifique à 20°C : 1,10 - 1,13
- Indice de réfraction : 1,35 - 1,37
- Viscosité : < 10 mPa/s

*Mesures de la valeur du pH dans des conditions d'utilisation au moyen d'un pH-mètre avec compensation de la température.

Propriétés microbiologiques

Recommandations/conditions	Concentration	Temps de contact	Température
Soluscope Serie 4 PA (WD) et Soluscope Serie 5 (WD)			
Bactéricide* (EN 13727, EN 14561), Mycobactéricide* (EN 14348, EN 14563), Fongicide* (EN 13624, EN 14562) & Virucide* (EN 14476, EN 17111)	1,8%	3 mins	40°C
Soluscope Serie XS (WD)			
Bactéricide* (EN 13727, EN 14561), Mycobactéricide* (EN 14348, EN 14563), Fongicide* (EN 13624, EN 14562) & Virucide* (EN 14476, EN 17111)	1,0%	6 mins	40°C

Se référer au manuel du laveur désinfecteur pour les conditions d'utilisation

*=conditions de propreté

Assortiment

Produit	Unité d'emballage	Code produit
Soluscope PAA	2 x 5 L	2206736BG

Mode d'emploi

Solution concentrée

- Mettre le bidon en place
- Visser le bouchon gris raccordé à votre Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 ou Soluscope Serie XS sur le bidon
- S'assurer que l'évent n'est pas bouché
- Réglage automatique des paramètres de cycle par le Laveur Désinfecteur
- Se référer au manuel d'utilisation du Laveur Désinfecteur

Durée de conservation après ouverture : 2 mois en cas de raccordement au laveur-désinfecteur (inscrire la date d'ouverture sur l'étiquette à l'endroit prévu à cet effet).

Stockage

Attention - respecter les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur concernant la classification et l'étiquetage des produits chimiques). Stocker entre +5°C et +25°C.

Utiliser les dispositifs médicaux en toute sécurité

Classe IIb

Veuillez lire l'étiquette et les informations présentées sur le produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



SOLUSCOPE SAS
(an Ecolab Company)
100, Rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Distribué par :

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Soluscope